

快滴

×

最滴



作業時間を大幅短縮

ストレスフリーな 複模型製作を

- ・低硬度(ショア16)のため、アンダーカット量の多い模型でも**脱型が容易**です
- ・流動性が非常に高いため、練和が容易で**細部まで流れ込み**ます
- ・簡単に**組立・解体**できる**使い捨てフラスコ**付き
(特許取得済 / 第 6288690 号)

——— 快適な使用感を、動画で check してください
URL
<http://youtu.be/32lXnQyyKgo>



- ・主材料は旭化成ワッカーシリコン株式会社より提供されています

安心安全な完全国産印象材です

販売名 **アルティメット印象材**

一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 医療機器届出番号:27B2X00252000003

標準価格 **40,000円** / セット

(セット内容)
A液・B液 各4kg
シリコンフラスコフレーム(大・小)各24個
(別売品)
シリコンフラスコベース(大) : 1,000円/個
シリコンフラスコベース(小) : 1,000円/個

●取扱店

販売元

株式会社 クエスト

[本社] ※営業・技術部門
徳島県小松島市芝生町字西居屋敷 53-1
Tel:0885-38-9777 Fax: 0885-38-9888

[愛知物流センター] ※ご注文・出荷倉庫
愛知県半田市横山町 157-1
Tel:0569-27-7017 Fax: 0569-27-5998

※表示価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元



ULTI-Medical

[2021.06版]

複模型用シリコン印象材 アルティメット 印象材



一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料
届出番号 27B2X00252000003
製造販売元: 株式会社ULTI-Medical

標準価格: **40,000円**

セット内容: A液(白) 4kg、B液(青) 4kg

シリコンフレーム(大) 24個

シリコンフレーム(小) 24個


別売品:

シリコンフレーム用ベース(大): 1,000円/個


シリコンフレーム用ベース(小): 1,000円/個

型	付加型
ショア硬度	16
寸法変化(%)	< 0.1
粘和時間	約1分30秒
操作時間	約3分
硬化時間(*1)	30分


*1 自社、試験によるもの(温度 約23°Cの条件下)。作業環境(温度)により硬化時間が大きく影響しますので十分に硬化していることを確認後に脱型して下さい。

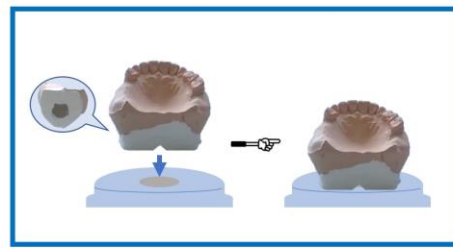


① 模型をベースの上に置きます。ベースの裏面には磁石を設置しています。模型にマウンティングプレートをご使用の場合は位置決めが容易です。

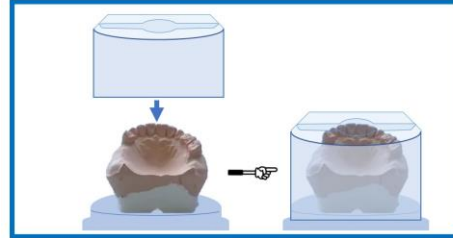


② 位置決めした模型の上に、フラスコを被せ、ベースにはめ込みます

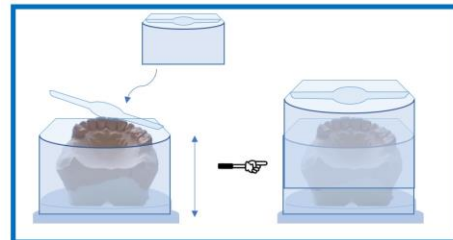


③ 模型が高い場合はフラスコを重ねて使います。(あらかじめ真中のプレートを折り重ねます)

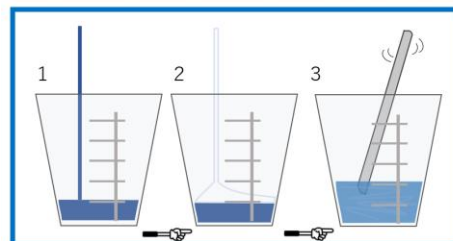

④-1. 高所よりB液を注いでください。
④-2. 次に同じ量のA液を注いでください。
④-3. 素早くかき混ぜてください。(目安は、1分30秒)

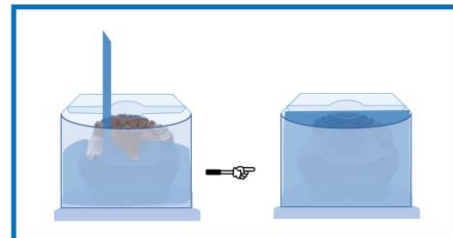

⑤ 模型が隠れてしまうまで、ゆっくりと注いでください。

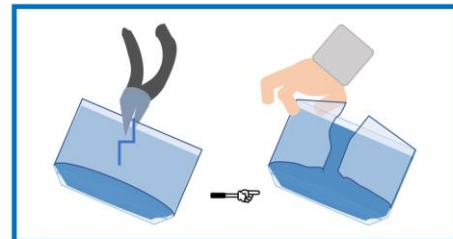

⑥ 硬化したらフレームをニッパーなどで切り込みして割り使い捨て部分を剥がします。

複模型用のシリコンが完成。フラスコベースは、再利用します。(単品で追加購入可能)作製したシリコンで、同じ模型を複製できるようになります。



※使用方法・使用上の注意は、添付文書をご確認ください。

製販HPの操作動画

●取扱店

販売元

株式会社クエスト

【本社】

徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1
TEL 0885(38)9777 FAX 0885(38)9888

【愛知物流センター】

愛知県半田市横山町157-1
TEL 0569(27)7017 FAX 0569(27)5998



2021.06版