

保険適用



ヴェーナスブロック

VenusBlock

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 CAD/CAM 冠材料 (IV) 医療機器認証番号 304AFBZX00009000



Quest

<http://www.quest-pure.com>

2023.3 版



ヴィーナスブロック
VenusBlock



クラスタ
ファイラー採用

10~100 μ m の 3 種類の
ファイラーをクラスタ化



3 層構造

3 層構造で自然な
グラデーションを再現



曲げ強度

曲げ強度

220 MPa

ビッカース硬度

70 HV0.2


01 支台歯形成のポイント



先端部 1.5mm 以上
舌側面 1.0mm 以上
マージン 0.8mm 以上


03 切削装置セットのポイント

グラデーションブロックは上下で色調が異なる為
切削装置への設置方向にご注意ください。
ブロックに印字のある面がエナメル面になります。

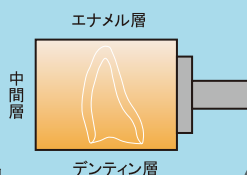

05 よく使う 3 色をご用意

美しい透過性で自然な歯を表現しました。

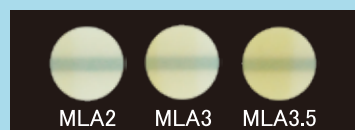

02 マージン形成のポイント

ディープシャンファーまたは、
ラウンドショルダーでマージン
形成を行ってください。



加工不可な形成方法


- ・J マージン
- ・ナイフエッジ
- ・アンダーカット
- ・ディープショルダー

04 優れた審美性

人工歯メーカーのノウハウを活かし
天然歯に近いグラデーションを再現



■寸法

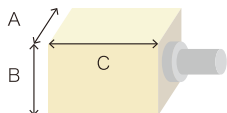

単位: mm

	A	B	C
14L	14.5	14.5	18.0

■色調 MLA2 MLA3 MLA3.5

■使用目的又は効果

本品は、歯科用コンピューター支援設計・製造ユニットで
切削加工するハイブリットレジン製ブロックであり、インレー
人工歯、クラウン等の歯科修復物の作製に使用する。

VenusBlock ヴィーナスブロック

標準価格(税抜) 14L サイズ(5個入り/箱) 22,000円

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 ヴィーナスブロック 医療機器認証番号:304AFBZX00009000

Quest 株式会社 クエスト

本社

〒773-0009 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1

TEL 0885-38-9777(代表) FAX 0885-38-9888

愛知
物流センター

〒475-0946 愛知県半田市横山町157-1

TEL 0569-27-7017 FAX 0569-27-5998